

Aspen. Collares infantiles y pediátricos
Un ajuste apropiado y fácil como contar 1 - 2 - 3

1. ¿Puntos del mentón ocultos? El mentón debe quedar paralelo a la parte delantera de la pieza plástica.
2. ¿Pasó la marca Velcro®? El panel posterior debe quedar superpuesto a los costados del panel delantero.
3. ¿FlexTabs™ dobladas? Las FlexTabs™ de los paneles delantero y posterior deben estar dobladas.

Pautas de tamaño

(Nota: nuevos colores de etiquetas)

PD 1		1 a 18 meses 11 a 29 lb peso 5 a 13 kg 21 a 33 pulg. altura 53 a 84 cm
PD 2		9 a 24 meses 22 a 33 lb peso 10 a 15 kg 39 a 37 pulg. altura 74 a 94 cm
PD 3		1 a 3 años 24 a 36 lb peso 11 a 16 kg 33 a 40 pulg. altura 84 a 102 cm
PD 4		2 a 5 años 26 a 42 lb peso 12 a 19 kg 35 a 45 pulg. altura 89 a 114 cm
PD 5		3 a 6 años 27 a 54 lb peso 12 a 25 kg 37 a 48 pulg. altura 94 a 122 cm
ADULTO bajo		5 años y mas peso 36 lb (16 kg) y mas altura 42 pulg. (107 cm) y mas



Sírvase consultar la hoja de instrucción del collar pediátrico para obtener más información.

© 2002 - 2004 Aspen Medical Products, Inc.
(800) 295-2776 • (949) 681-0200
www.aspenmp.com


983174 REV J 10/04

Aspen. GUÍA DE TAMAÑO - COLLAR CERVICAL

Elija el tamaño adecuado

Mantenga la cabeza del paciente en posición neutral o en la posición deseada y coloque la guía en el punto más alto del trapecio, en forma plana contra el costado de la cabeza.

Trace una línea perpendicular imaginaria desde la base del mentón hasta la guía, y seleccione el tamaño de collar adecuado.

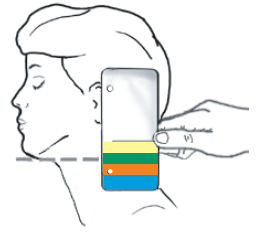

Verifique el encaje adecuado

1. El mentón debe quedar paralelo a la parte delantera de la pieza plástica.
2. Las FlexTabs™ de los paneles delantero y posterior deben estar dobladas.
3. El collar debe quedar ajustado pero sin tocar el área de la tráquea.

Extra alto

Alto

Regular

Bajo

Antes de aplicar este dispositivo, se debe recibir la capacitación adecuada para usarlo. Estas instrucciones se dan exclusivamente a manera de pautas, y no constituyen recomendaciones médicas.